



Notified body, Module B
certification (0086):
BSI Group Kitemark Court,
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, MK5 8PP,
United Kingdom
Certificate number: 698199

Notified body, Module D
conformity assessment (0194):
INSPEC International Ltd.,
56 Leslie Hough Way, Salford,
Greater Manchester, M6 6AJ,
United Kingdom

CE 0194

EN 149:2001 + A1:2009

EHS

TP TC No. 019/2011

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
Germany

T: +49(0)911 97 36 0
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.com

uvex

User instruction for uvex silv-Air premium plus

Article: FFP1: 8765101, 8765111
FFP2: 8765201, 8765211, 8765221
FFP3: 8765311, 8765321

protecting people

uvex-safety.com

protecting people

uvex-safety.com

CZ Návod k použití

1) Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití 2/3) Podmínky skladování – viz obal 4/5) Datum výroby a spotřeby – viz obal

Přeprava Žádné speciální požadavky, které by bylo třeba dodržovat.

Použití Filtrační polomaska je plnohodnotným ochranným prostředkem dýchacích orgánů, který je kompletně či z převážné většiny vyroben z filtračního materiálu (neobsahuje alergeny). Lze použít pro stupně ochrany FFP1 (modrá), FFP2 (oranžová) a FFP3 (černá) pro ochranu proti pevným a kapalným aerosolům až do čtyřnásobku definované mezní hodnoty (MH). FFP1 = 4 x MH (nechrání před částicemi rakovinotvorných a radioaktivních látek, mikroorganismy ani enzymy), FFP2 = 10 x MH (nechrání před částicemi radioaktivních látek, viry ani enzymy), FFP3 = 30 x MH.

*) Mezní hodnoty jsou např. mezní hodnoty MAK a TRK ve vzduchu na pracovišti uváděné v normě TRGS 900. (MAK = maximální koncentrace při práci; TRK = směrná technická koncentrace)

Varování/omezení Seznamte se s národními předpisy a návodem k použití a dodržujte je. Masku nechrání před plyny a parami. Uživatel musí být obeznamen se způsobem použití a manipulace s výrobkem. Vousy/kotlety nebo jizvy v oblasti okraje masky brání správnému usazení masky. S filtrační polomaskou není dovoleno vstupovat do nevětraných kontejnerů, jam, kanálů a malých prostor. Obsah kyslíku v okolí musí být min. 17 obj. % (respektujte národní normy). V případě rizika nedostatku kyslíku, příliš vysoké koncentrace nebezpečných látek nebo neznámých podmínek je třeba použít autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem. V případě, že se dýchání v masce stane obtížným, po použití nebo při poškození masky ji zlikvidujte dle místních předpisů. Na výrobku nesmí být prováděny žádné změny. Nepoužívat ve výbušném prostředí.

Kontrola před použitím Masku musí být vhodná k použití. V každém jednotlivém případě je třeba posoudit rizika individuálně. V případě nejistoty nebo máte-li dotazy týkající se použití, obraťte se na svého bezpečnostního technika. Kontrolujte datum spotřeby masky a také, zda není viditelně poškozena. V případě poškození nebo překročení data spotřeby masku nepoužívejte.

Návod k nasazení masky Řiďte se piktogramy na obalu, a to ve správném pořadí. Náhlavní pás oběma rukama opatrně roztáhněte (není nutné u textilních náhlavních pásů). Tvarovanou či rozloženou masku položte do ruky tak, aby náhlavní pásy visely z ruky dolů. Nasadte si masku pod bradu, nosní sponou směrem nahoru. Umístěte spodní pásek okolo krku a horní nad uši. Upravte nosní sponu. Je-li to možné, uzavřete a/nebo upravte náhlavní pás. Překontrolujte, zda maska těsně doléhá: Obě ruce položte okolo masky a zhluboka vydechněte. Pokud na okrajích masky, u nosní spony a/nebo náhlavního pásu uniká vzduch, proveďte další úpravu. Pokud maska těsně nesedí, nevstupujte na pracoviště! Správně padnoucí maska je nezbytná pro vaši ochranu, nesprávné nasazení může vést k vážným onemocněním.

Skladování Uchovávejte v originálním obalu. Podmínky skladování / datum spotřeby jsou uvedeny na obalu. Chraňte masku před chemickými látkami, vlhkostí, přímým slunečním zářením a nečistotami.

Označení NR = jednorázová (zlikvidujte po jedné směně); R = opakovaně použitelná (avšak ne déle než 3 směny), dodržujte instrukce z části „Čištění“; D = vyhověla testu na dolomitový prach

Čištění/dezinfekce U masek s označením R vnitřní prostor masky ihned po použití vyčistěte a vydezinfikujte čisticím sprejem uvex clear (nástřík po dobu 5 sekund ze vzdálenosti cca 30 cm). Před dalším použitím zkontrolujte, zda je maska vhodná k použití.

Schválení Výrobek splňuje požadavky harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009 a odpovídá až do 20. 4. 2018 směrnici 89/686/EHS s přechodným obdobím jednoho roku. Nejpozději od této doby budou výrobky splňovat požadavky nařízení 2016/425. Platnou judikaturu najdete v prohlášení o shodě, které naleznete na stránce:

www.uvex-safety.com/ce